



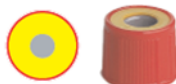
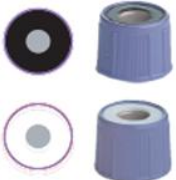
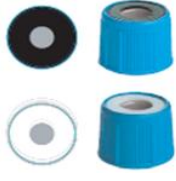
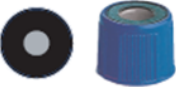
Vojenská nemocnice Olomouc

Sušilovo nám. 5, 779 00 Olomouc

Oddělení klinických laboratoří

Tel.: 973 407 180, 973 407 286, e-mail: laborator@vnol.cz

Odběrový systém Vacuette® (Greiner Bio-One)

Biologický materiál	Typ odběrové zkumavky	Promíchání vzorku *	Barva uzávěru	Použití
Srážlivá žilní krev	Akcelérátor hemokoagulace 4 ml 9 ml	5-10		Klinická biochemie Sérologie
Srážlivá žilní krev	Akcelérátor hemokoagulace se separačním gelem 8 ml 3,5 ml	5-10		Klinická biochemie
Nesrážlivá žilní krev	Lithium heparin 2ml	5-10		Klinická biochemie
Nesrážlivá žilní krev	K ₃ EDTA 3 ml 1 ml	8-10		Klinická hematologie Imunohematologická vyšetření (Klinická biochemie)
Nesrážlivá žilní krev	Natrium citrát (1:9) 3 ml 2 ml	4		Klinická hematologie Koagulace
Nesrážlivá žilní krev	Natrium fluorid+oxalát 2 ml	5-10		Stanovení glukózy, laktátu
Nesrážlivá žilní krev	Natrium citrát (1:4) 2 ml 1,5 ml	5-10		Sedimentace
Nesrážlivá žilní krev	Natrium heparin 6 ml	5-10		Stanovení stopových prvků

* Počet opatrných převrácení ihned po odběru.

Typ odběrové zkumavky pro požadované vyšetření je uveden na požadavkovém listu (žádance) OKL barevným označením. V elektronické žádance NIS VN Olomouc jsou typy odběrových zkumavek uvedeny slovním vyjádřením barvy uzávěru.